



GE生体情報モニタ用アクセサリに 使用可能な薬剤について

本書に含まれる表は、GE生体情報モニタ用アクセサリに使用可能な薬剤一覧を示しています。

使用可能な薬剤は、[GE Healthcare cleaning web site](#)でもご参照いただけます。

※本ウェブサイトは世界共通のページであり、国内で一般的でない薬剤も掲載されておりますので必要な薬剤については薬剤を取り扱う業者様へお問い合わせいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。



符号の説明： "A" = 使用可能 " " = 未検証 "N" = 使用不可	製品グループ	商品番号	90%エチルアルコール	イソプロピルアルコール60%	グルタルアルデヒド 2%	フェノール2%	次亜塩素酸ナトリウム10%	酒石酸0.75% 第4級アブモニウム化合物 5%	クロラミン5%	ホルムアルデヒド <0. 3%	酵素系洗浄剤	10% 漂白剤溶液	イソプロピルアルコール70%	PDI スーパーサニクロス	PDI サニクロス HB	蒸留水
ネルコアOximaxケーブル	ネルコアOximax SpO2センサ用ケーブル	2025350-001 2021406-00X 2006644-001	A	A	A		A	A	A	A						
GE TruSignal SpO2センサ	ソフトセンサ	TS-SP-D TS-SA-D TS-SP3-GE TS-SA4-GE	A	A	A	A	A	A	A	A						
GE TruSignal SpO2センサ	SpO2ケーブル	TS-N3 TS-M3 TS-H3 TS-G3	A	A	A	A	A	A	A	A						
GE TruSignal SpO2センサ	フィンガーセンサ	TS-F-D TS-F4-N TS-F4-GE TS-F2-GE TS-F1-H	A	A	A	A	A	A	A	A						
GE TruSignal SpO2センサ	ラップセンサ	TS-W-D TS-SE-3	A	A	A	A	A	A	A	A						
GE TruSignal SpO2センサ	イヤセンサ	TS-E-D TS-E4-N TS-E4-H TS-E4-GE	A	A	A	A	A	A	A	A						
NIBPカフ&ホース	全NIBPアクセサリ	全NIBPアクセサリ 品番		A							A	A	A	A	A	A
NMTアクセサリ	NMTケーブル&センサ	888414 888416 888417 888418 897439	A	A	A	A										
EEGアクセサリ	EEGリードセット	898050 898052	A	A	A	A										

注：バイエア製品またはOEM製品に使用可能な薬剤の情報については、ユーザーマニュアルまたは取扱説明書を参照してください。