

# クイックガイド (Invenia ABUS スキャンステーション編)

- はじめに
- 基本構成
- スキャンステーションの起動
- 検査の準備
- タブについて
- 患者情報の登録とプロトコルの選択
- 患者情報の登録 - ワークリストの場合
- 検査の注意
- 被験者の体位について
- ローション・超音波ゲルの塗布
- 関節型アーム・スキャナーアッセンブリーの調整
- スキャンビュー
- 深度の選択
- 圧迫方法
- 画像の収集
- スタートストップスキャン
- ロック/アンロックの切替
- 画像収集後の操作
- Verify
- 検査の転送確認と再送方法
- 終了操作
- 定期メンテナンス



# 検査の転送確認と再送方法

スキャンステーションの電源を切る前に、データが転送できているかをご確認下さい。

## 転送の確認方法

### 1. ワークリストを使用していない場合

Selectタブからワークリストアイコンを選択して下さい。

(ワークリスト使用時には Selectタブにワークリスト画面が表示されています)



### 2. 検査リストが表示されます。

検査リスト“Status”欄の表示をご確認ください。



正常に転送完了しています。




正常に転送されていません。データの再送をお願いします。

Status	ID	Name	DOB	Scan Date	Scan Time
✓	1111	Test, Test		08/19/2016	09:38 AM
✓	065	Ch, Ch		08/10/2016	01:12 PM
✓	060	Ch, Ch		08/10/2016	01:31 PM
✓	2349	Pro, Ch		08/10/2016	06:51 PM
✓	1204	Pro, Ch		08/19/2016	08:39 PM
⚠	f	F, F		01/14/2016	06:20 PM
✓	e	E, E		01/14/2016	06:40 PM
✓	e	D, D		01/14/2016	06:40 PM
✓	k	B, B		01/14/2016	08:22 PM
✓	a	A, A		01/14/2016	04:25 PM
✓	c	C, C		01/12/2016	07:50 PM
✓	b	B, B		01/12/2016	07:50 PM

## 検査の再送方法

1. 転送する対象の検査を選択して下さい。  
検査内の画像とアイコンを表示します。
2. データの転送アイコン  を押すと転送先のウィンドウを表示します。  
転送先を選択して下さい。転送開始します。

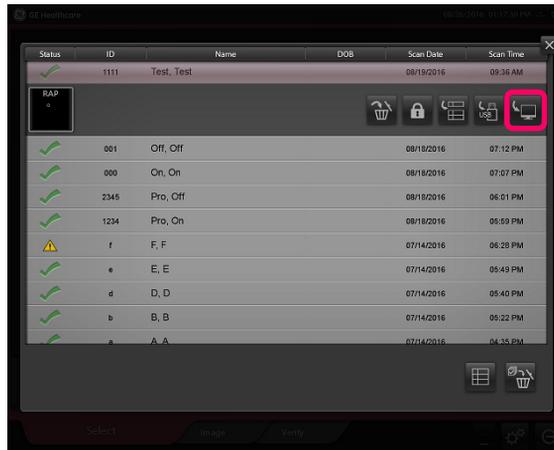

## アイコンで 転送の状況を表示します



白 : 転送中



緑 : 正常に転送完了




黄色 : 転送失敗

# 終了操作

電源OFFの前に必ず検査が正常に転送されているかをご確認ください。  
“検査の転送確認と再送方法”の項をご参照下さい。

1. Selectタブ右下の  ログオフキーを押して下さい。

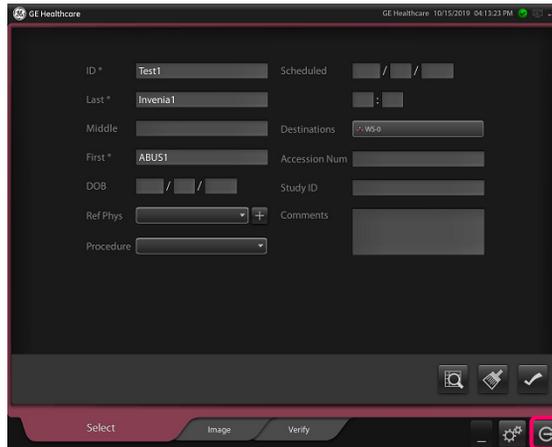

2. 主電源スイッチを押して下さい。



主電源スイッチ



# 定期メンテナンス

装置を安全に正しく機能させるために 下記箇所のメンテナンスを行ってください。

部位	メンテナンス方法	頻度
スキャナーアッセンブリー	乾いた柔らかいクリーニングクロス・ 消毒用ワイプで拭いてください。	検査毎(患者毎)
タッチスクリーン	画面クリーナーで拭いてください	毎日
本体 ウエイトタワー アーム	乾いた柔らかいクリーニングクロス・ 消毒用ワイプで拭いてください。	週に1度
フィルタ	掃除機	月に1度

## スキャナーアッセンブリー

- 各検査毎 (患者さん毎) に清掃を行ってください。
  - メンブレンは Disposable です。  
患者さん毎に取り外しし廃棄して下さい。
  - 消毒用ワイプを使用して、スキャナーアッセンブリーとトランスデューサーの患者さんに接触する部分を清掃して下さい。
  - トランスデューサーの清掃にはアルコール系溶剤を使用しないでください。
- トランスデューサー周囲の掃除時に、トランスデューサー位置を中央⇔端に変更することができます。  
操作時にはメンブレンの装着が必要になります。
    - 1) Selectタブ右下の Configurationキーをタッチして下さい。
    - 2) Configurationウィンドウ左側から [Scanning Protocols] を選択して下さい。
    - 3) Scan Start Position で Center/Edge を切り替えることができます。  
清掃後は元の設定に戻して下さい。

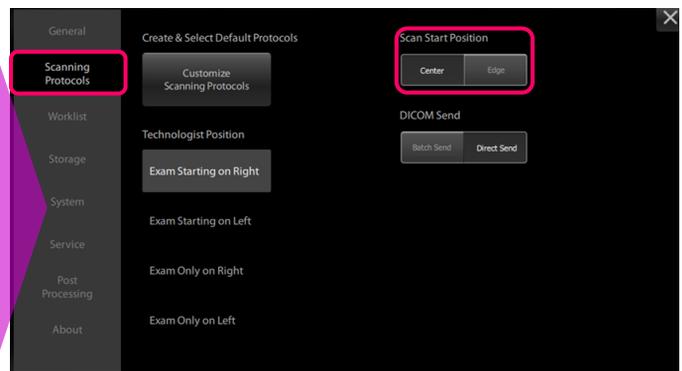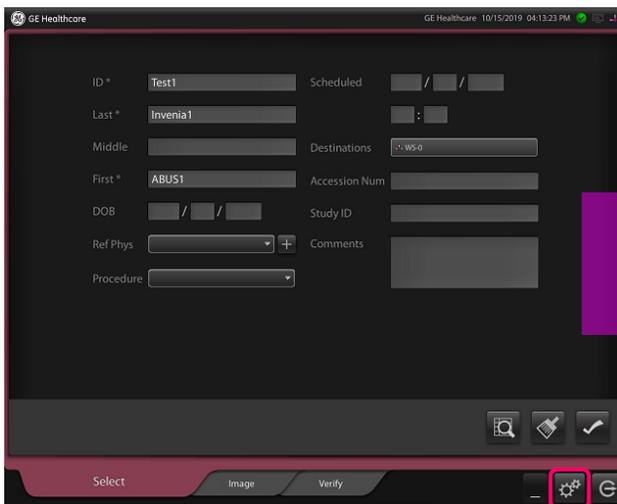

Center



Edge

## フィルター

- 1) 本体の電源をOFFにして下さい。
- 2) 本体背面 下部にフィルターが装着されています。  
マジックテープを外して、フィルターを抜き出して下さい。
- 3) 掃除機などで埃を吸い取って下さい。
- 4) 掃除後はマジックテープ面を上にし、元の位置に戻して下さい。  
マジックテープでとめてください。

